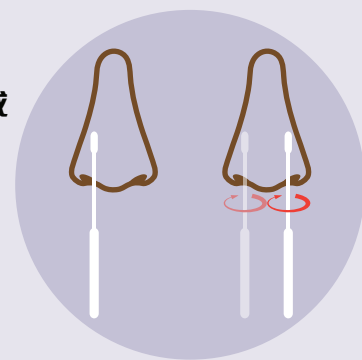


GLINE-2019-nCoV Ag

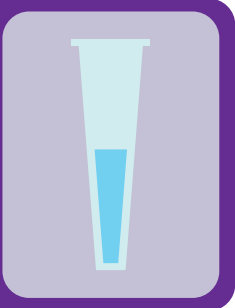
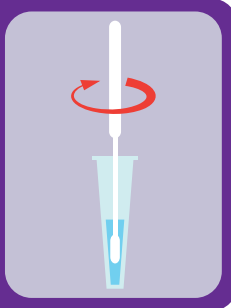
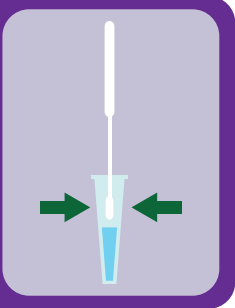
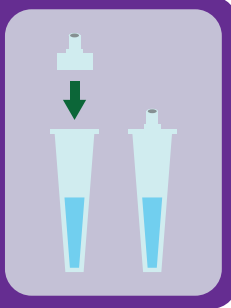
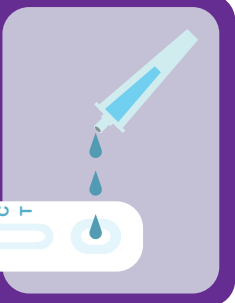

樣本採集方法

正確的樣本採集與處理方法十分重要。不正確的方法可能影響檢測結果。

- 1 要採集樣本，請輕輕地把棉棒伸進鼻孔（約1.5厘米深），沿鼻孔內壁打5個圈或以上。然後以同一支棉棒在另一側鼻孔裡重複同樣的步驟。
- 2 採樣後，盡快處理樣本。不要把棉棒放回包裝袋內。
- 3 樣本需在三分鐘內處理，不要把棉棒雪藏或送到其他地點。
- 4 為確保結果準確及預防交叉感染，採集與處理時請確保與其他人保持社交距離。



樣本處理方法

- 1 剝去裝有測試溶液的小管上的箔膜，把小管放到包裝盒上的預定位置。
- 2 把棉棒浸在測試溶液中，上下移動並透過小管擠壓棉棒至少15秒。移動時，要小心不要把測試溶液濺出。
- 3 拿走棉棒時，請用手擠壓小管，務求把棉棒吸走的測試溶液滴回小管內。
- 4 把小管上的蓋子蓋好，小心把測試溶液搖勻。
- 5 擠出3滴小管內的測試溶液到測試棒上的樣本位置。
- 6 置於室溫15分鐘後（不可多於20分鐘）查看檢測結果。20分鐘後的結果是無效的。

解讀快速測試結果

陽性

在(C)和(T)區分別顯示一條線

解釋:樣本中檢測到 SARS-CoV-2 抗原。
請注意 (T)區的線可能非常淺色。此處任何可見的彩色線都是表示陽性。
這表示你可能感染了2019冠狀病毒。



陰性

只在(C)區內顯示一條線

解釋:樣本中沒有檢測到 SARS-CoV-2 抗原。
陰性結果不能排除你感染2019冠狀病毒的可能性。



無效

在(C)區內沒有顯示一條線

解釋:測試無效。
請仔細留意採樣及處理方法是否正確，取得新的快速測試再試一次。

